

Så används hjärtstartaren

ZOLL AED Plus hjärtstartare är enkel att använda och vägleder livräddaren genom hela behandlingsförloppet.

1 Kontrollera medvetandet

Kontrollera medvetandet och andning. Kalla på hjälp och ring 112.



2 Starta hjärt-lung-räddning

Hjärt-lung-räddning startas medan hjärtstartaren hämtas.




3 Starta hjärtstartaren

Följ hjärtstartarens instruktioner.




4 Anslut elektroderna

Avlägsna kläder och anslut elektroderna enligt anvisningarna.

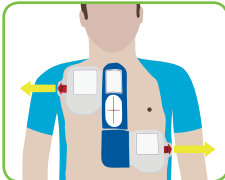


5 Defibrillering

Tryck på den blinkande knappen om du uppmanas till detta. Rör inte personen.

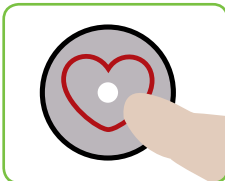

6 Följ instruktionen

Följ instruktionerna till ambulans anländer.

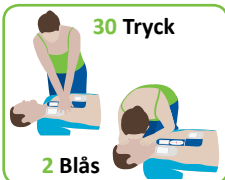

ZOLL®

ZOLL Medical Corporation är en av världens största tillverkare av defibrillatorer (hjärtstartare). Verksamhetens rötter går tillbaka mer än 50 år, när Professor Paul Zoll, Harvard Medical School, utförde de första kliniska studierna med extern defibrillering och pacing på människor.

ZOLL utvecklar idag lösningar som ökar chansen att överleva hjärtstopp.

ZOLL's unika produkter har gjort dem till en av USA's snabbast växande företag. Bland kunderna i Sverige finns en mängd sjukhus, ambulansorganisationer samt andra offentliga och privata, verksamheter.

Rädda liv med en hjärtstartare



Medidyne MAKING A DIFFERENCE

Medidyne AB | Tel +46 431 448 050 | www.medidyne.se

Gör skillnad och rädda liv

Varje timme drabbas någon i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Snabb och korrekt insats inom de första minuterna är helt avgörande. Chansen att överleva minskar med 10 % för varje minut som går, utan att hjälp ges till den drabbade. Hjärt-lungräddning är den viktigaste initiala hjälpen, men det är bara en hjärtstartare som kan återstarta ett hjärta som stannat. Hjärt-lungräddning upprätthåller bara liv.

I Sverige överlever endast ca 5 % av alla dem som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Internationella vetenskapliga undersökningar visar att snabb insats med hjärt-lungräddning och hjärtstartare kan öka överlevnaden till drygt 70 %.

ZOLL AED Plus är den enda hjärtstartaren med inbyggd REAL CPR Help, som mäter och registrerar hur du utför bröstkompressionerna, och som samtidigt ger dig återkoppling i realtid så att du kan ge optimal behandling. Du vägleds med hjälp av röstinstruktioner, bilder, textmeddelanden så att du kan hjälpa den drabbade på ett effektivt och säkert sätt.

Hjärt-Lungfonden och Civilförsvarsförbundet

Hjärt-Lungfonden och Civilförsvarsförbundet har valt att samarbeta med ZOLL AED Plus hjärtstartare, med syfte att få ut fler hjärtstartare och därmed ökad chans för fler räddade liv.

✓ Under ett löpträningspass drabbades Morten Berthelsen av hjärtstopp. HLR och elstöt från hjärtstartaren ZOLL AED Plus, räddades hans liv.



Det kan drabba alla

Hjärtstopp kan drabba människor i alla åldersgrupper, men risken stiger med åldern. Ofta inträffar hjärtstoppet plötsligt och oväntat.

27-årig man räddad av AED Plus hjärtstartare

27 Juli 2012 är en dag som Morten Berthelsen aldrig kommer att glömma. Morten var på semester på den Danska ön Bornholm. Där var han ute och löptränade när han plötsligt drabbades av hjärtstopp. Folk i närheten startade omedelbart HLR, medan två Tyska turister hämtade närmaste hjärtstartare som fanns i den lokala matbutiken. Med effektiv HLR och en elstöt (defibrillering) med hjärtstartaren, räddades livet på Morten.

Detta är nästan helt säkert att utan HLR och elstöt från hjärtstartaren, hade Morten inte levt idag.



ZOLL AED PLUS®

Feedback på bröstkompressionerna

ZOLL's patenterade elektroder mäter bröstkompressionernas takt och djup. En röst i hjärtstartaren berättar om du ger effektiva bröstkompressioner.

Unik grafisk och användarvänlig design

Röst, ljud, text och grafiska illustrationer vägleder dig tryggt och säkert genom hela återupplivningsprocessen.

En elektrod är enklare än två

ZOLL's patenterade elektroder CPR-D padz är två elektroder samlade i ett stycke, som snabbt och enkelt placeras på den drabbades bröstorg.

Mindre underhåll och låga driftskostnader

Batteripack och elektroder byts vart femte år. Detta gör att underhållet på hjärtstartaren blir enkelt och billigt.

Automatiska självtester och 7 års garanti

Automatiska självtester försäkrar dig att hjärtstartaren alltid är klar för användning. Hjärtstartaren inkluderar också 7 års garanti.

ZOLL AED Plus är robust, användarvänlig och en av de vanligaste modellerna på den Svenska marknaden.

Läs mer om ZOLL AED Plus på www.zollaed.se